

www.drivemedical.com

drive™

banco de transferencia con
asiento deslizante y patas
plegables

item # RTL12075



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive™

funcionamiento

1. Coloque la banca de transferencia dentro de la bañera de manera que las patas con la copa de succión estén DENTRO de la bañera. (Si se prefiere colocar la banca viendo hacia la parte opuesta, puede cambiar las patas al otro lado de la banca presionando las clavijas de presión, quitando las patas e introduciéndolas en los receptáculos opuestos de las patas).
2. Ajuste la altura de las patas a la altura deseada al presionar las clavijas a presión y colocarlas en la altura adecuada. Nota: Las patas deben estar colocadas de manera que la banca esté nivelada, tomando en cuenta que las patas dentro de la bañera tendrán que colocarse a una altura menor debido a la diferencia en altura de la mayoría de las bañeras con los pisos.
3. Para mover el asiento, jale la palanca roja de posición ubicada debajo del asiento en dirección opuesta al armazón y deslice el asiento hasta que haga clic en su lugar. Nota: existen dos (2) posiciones en donde puede asegurar el asiento al armazón, una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho.

instrucciones de montaje

1. Saque las partes de la caja.
2. Coloque el armazón de la banca de transferencia en su costado. Desdoble una sección de la pata al extenderla hacia afuera. Las clavijas bloqueadoras (2) se colocarán en su lugar cuando las patas estén aseguradas. Asegúrese que ambas clavijas bloqueadoras sobresalgan a través de los hoyos.
3. Repita los mismos pasos para la segunda sección de la pata.
4. Levante y coloque la banca de transferencia verticalmente. Introduzca el respaldo dentro del receptáculo del respaldo ubicado en la parte de atrás del asiento. Presione hacia abajo firmemente para asegurarlo en su lugar.
5. Coloque la agarradera roja introduciéndola dentro de los dos hoyos del receptáculo ubicado en el costado del asiento. Asegúrese de que la curva de la agarradera esté hacia afuera. Nota: debe introducir la agarradera en el mismo lado de las patas con la copa de succión grande. Asegúrela en su lugar introduciendo las dos (2) perillas de bloqueo rojas por la parte de abajo y dando vuelta hacia la derecha hasta que estén apretadas.
6. Introduzca la base para el jabón en el mismo lado de la agarradera roja deslizándola en la parte del medio del receptáculo desde arriba hacia abajo.


para doblarla

Para doblarla para guardarla o transportarla, coloque la banca verticalmente sobre un juego de patas. En un lado del armazón de las patas, jale ambas palancas rojas de bloqueo, lejos del armazón simultáneamente hasta que ambas clavijas de bloqueo se desenganchen. Doble las patas hacia abajo. Coloque la banca en el otro lado y repita lo mismo para el otro juego de patas. Quite el respaldo, la agarradera y la base para el jabón si es necesario.

PRECAUCIÓN:

Cuando entre o salga de la regadera o bañera usando la banca de transferencia, asegúrese que el asiento esté bloqueado en su posición.

CAPACIDAD DE PESO: 300 LBS (136 KG)

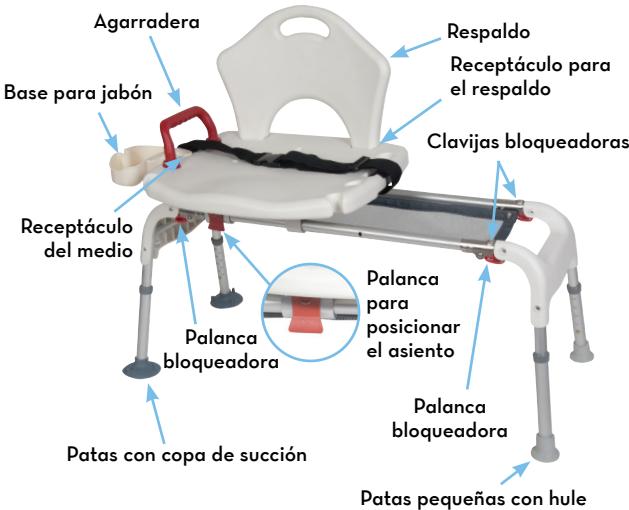

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



©2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China



www.drivemedical.com