

Banco de Plástico para Transferencia

Item # RTL12031KDR



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

driveTM

Instrucciones de armado

Capacidad de peso: 400 lbs (181 Kg)

1. Saque las partes de la caja.
2. Coloque ambas secciones de la banca de traslado boca abajo sobre una superficie plana.
3. Deslice la sección más pequeña del asiento dentro de la sección más grande al presionar las clavijas a presión e introducir las dentro de los receptáculos. Los botones de ajuste a presión sobresaldrán al asegurarse. (Figura 1)

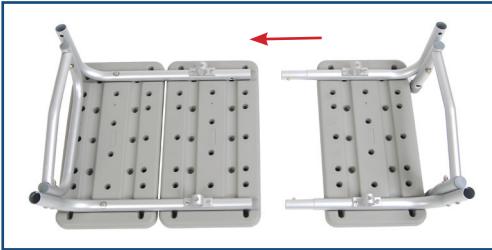


figura 1

4. Quite las tapas negras de los 4 receptáculos de las patas.
5. Coloque la pata con la copa de succión grande (marcada con "A") dentro del receptáculo (marcado con "A") al presionar la clavija a presión. Repita el mismo procedimiento para la segunda pata (Figura 2)



figura 2

6. Coloque la pata con la punta de caucho pequeña (marcada con "B") dentro del receptáculo (marcado con "B") al presionar la clavija a presión. Repita el mismo procedimiento para la segunda pata (Figura 3)

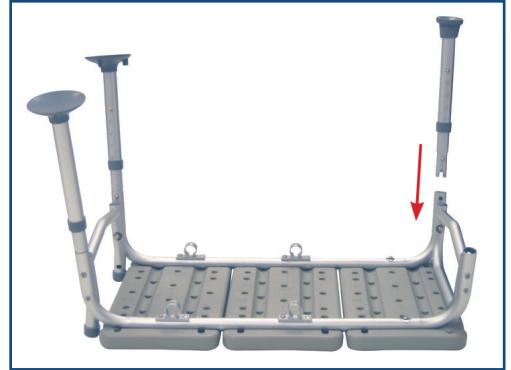


figura 3

7. Voltee la banca de traslado hacia arriba. Coloque el descansabrazos deslizándolo dentro del receptáculo para el brazo que se encuentra en un lado de la banca presionando las clavijas a presión. Asegúrese que el arco del descansabrazos está hacia afuera y no hacia adentro (Figura 4).



figure 4

8. Para armar el respaldo, introduzca el tubo de soporte dentro del soporte de respaldo, presionando la clavija de presión y deslizándolo dentro del tubo del respaldo. Repita el mismo procedimiento para el segundo tubo de soporte (Figura 5)

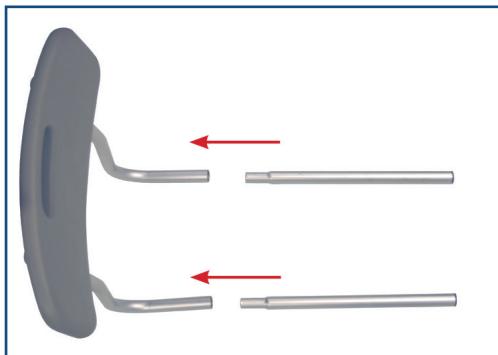


figure 5

9. Introduzca el respaldo dentro de la base al presionar las clavijas de presión y deslizar los tubos del soporte dentro de ambos receptáculos. Nota: El respaldo debe pasar por ambos juegos de receptáculos para estar asegurado (Figura 6).



figure 6

NOTA: El respaldo es reversible y se puede acomodar para entrar a la bañera por el lado izquierdo o derecho. También puede cambiar la profundidad del asiento de su banca de traslado al presionar las clavijas a presión debajo del asiento y deslizar los tubos hacia el frente hasta que las clavijas encajen en su lugar.

8. Coloque las patas con las copas grandes de succión dentro de la tina de baño.

para ajustar la altura de la pata

1. Para ajustar la altura de la pata, quite el clip en U del orificio de ajuste, fije la pata a la altura deseada y vuelva a colocar el clip en U dentro del orificio de ajuste. Asegúrese de que el clip en U se bloquee en su lugar. Repita los mismos pasos para las patas restantes.

NOTA: Asegúrese de que todas las patas estén colocadas a la misma altura.

2. Presione las patas hacia abajo o jálelas hacia arriba para asegurarse que estén aseguradas en su lugar.

precauciones adicionales

1. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO LO USE si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/portador para recibir instrucciones adicionales.
2. Asegúrese de que los botones de ajuste a presión salgan completamente por los hoyos respectivos para cada extensión de la pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.
3. Asegúrese que TODOS los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
5. Todos los cuatro tapones de las patas DEBEN de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
6. NO SE pare sobre la banca.

NOTA: Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2015 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Hecho en China