



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



**BIK**   
TRICICLO ADAPTATIVO



**Para moverse  
de forma independiente**  
con excelente agarre al suelo y estabilidad

**BIK**   
TRICICLO ADAPTATIVO

# Movilidad segura ecológica

Para niños y adultos con control discreto del tronco y conciencia de su entorno



PRODUCT  
MARKED 

BIKO es un PRODUCTO SANITARIO que CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD definidos en el REGLAMENTO (UE) 2017/745

# Tipos de configuraciones

## Rueda libre



Permite dejar de pedalear el triciclo durante el movimiento hacia adelante.

con o sin diferencial

## Piñón fijo



Permite la **marcha atrás** y el **movimiento continuo de los pedales**, con el triciclo en movimiento.

con o sin diferencial

## Caja de cambios



Permite dejar de pedalear durante el movimiento hacia adelante del triciclo, **frenar con el contrapedal** y **dar marcha atrás**.


con diferencial

El triciclo y los componentes posturales deben ser seleccionados y ajustados por un profesional de la salud, que evalúe las capacidades residuales del usuario. Durante el uso del triciclo se requiere siempre la supervisión de un adulto, familiar o persona calificada.

# Rueda libre o piñón fijo

La rueda libre permite el movimiento en el sentido de la marcha solo durante el pedaleo, por lo que no obliga al ciclista a realizar el movimiento con las piernas. Con una bicicleta equipada con rueda libre, las piernas pueden descansar mientras la bicicleta mantiene su movimiento hacia adelante.

Por otro lado, una configuración de piñón fijo hace que el movimiento de las ruedas traseras active directamente el movimiento del pedal. Como resultado, se produce una movilización pasiva de las extremidades inferiores, incluso si no participan activamente en el pedaleo, por ejemplo, mientras el cuidador empuja la bicicleta.

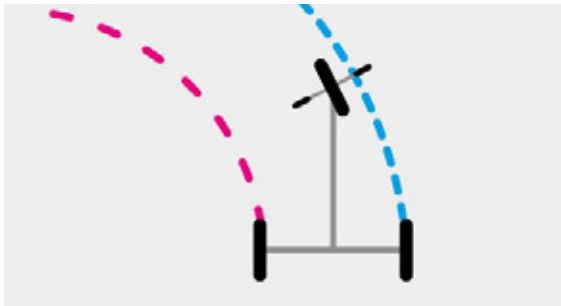

## Diferencial

El diferencial es un dispositivo que facilita enormemente al usuario al tomar una curva, permitiendo que las dos ruedas traseras se desplacen a diferentes velocidades (la rueda trasera interior recorre una distancia menor que la exterior). También facilita el arranque con el manillar dirigido.

El triciclo puede equiparse con diferencial y rueda libre a pedido, o con diferencial y piñón fijo. El diferencial se incluye en la configuración con la caja de cambios de tres velocidades.

Disponible opcionalmente en la talla pequeña (en la talla mini, la menor distancia y la menor diferencia en los radios de curvatura de las ruedas traseras no lo hacen necesario).



## Caja de cambios de 3 velocidades

La caja de cambios de tres velocidades permite ajustar fácilmente el esfuerzo y la velocidad según la capacidad del triciclista. Con esta caja de cambios, se disfruta de las ventajas de la versión de rueda libre, con posibilidad de utilizar marcha atrás y freno contrapedal.

Se puede activar con el usuario parado. La pantalla muestra la marcha actual.

Disponible desde la talla M.

## Sistema "Switch"

El "Switch", disponible para todas las tallas, es un mecanismo que permite cambiar de piñón fijo a rueda libre y viceversa en el mismo cuadro, simplemente accionando una palanca roja situada debajo del canasto.

La configuración "Switch" se suministra con diferencial para las tallas S, M, L y XL, y sin diferencial para la mini.

# Tamaños y colores

Diferentes tamaños colores para satisfacer las necesidades de niños y adultos.

mini



Small



Medium



Large



Extra Large



# Bajo y fácil acceso

El acceso bajo, equipado con una plataforma antideslizante, facilita el ascenso y descenso del usuario, permitiéndole sentarse con las piernas a cada lado sobre el cuadro, de forma independiente.





## **Pedalera posicionada hacia adelante con respecto al asiento**

Combinados con la altura del asiento y del manillar, estos factores facilitan mantener una posición alineada que, a su vez, ayuda a mantener el movimiento del pedal y la respiración adecuada.

# Sistema de plegado innovador integrado en la plataforma



Excepto tamaño mini.



**fácil de accionar**



# Soportes anatómicos

Los soportes ofrecen contención posterior/lateral al tronco y la pelvis y, gracias a la correa con cierre, también una buena contención frontal.

Ideal para quienes necesitan ayuda para mantener el tronco en posición erguida y media, y mantenerse sobre la bicicleta con mayor facilidad.

## Para el tronco

Ajustable en altura (mediante la varilla 883), en inclinación y en dirección anteroposterior mediante la articulación.

## Para la pelvis

Ajustable en altura (mediante la varilla 883).



**Sin herramientas**





Tamaños M, L, XL



Tamaños Mini y Small

## Freno delantero

Se acciona mediante una palanca en el manillar derecho o izquierdo. La distancia entre la palanca de freno y el manillar se ajusta mediante un tornillo.



## Sistema de bloqueo

Permite bloquear el triciclo. Imprescindible para subir y bajar del mismo.



## Campana y asas ergonómicas

Para un mejor agarre y comodidad.



## Luz frontal led

2 funciones: fija e intermitente. Disponible en tallas M, L y XL.



## Luz trasera led

Con carga USB. 5 modos diferentes de iluminación. Con indicador de batería y cable USB. Los detalles reflectantes en el canasto también garantizan la seguridad vial.



## Canasto de tela

Ubicada en la parte trasera del triciclo, cuenta con una base rígida fácilmente desmontable. La tapicería cuenta con detalles reflectantes. Se fija con broches y es extraíble para su lavado.



NO SENTARSE



NO PARARSE



mini - 15 kg (33 Lb)  
S-M - 25 kg (55 Lb)  
L-XL 35 kg (77 Lb)



## Asiento ergonómico

Diseñado para una máxima comodidad. Ajustable en altura, inclinación y dirección anterior y posterior.



## Guardabarros

La lluvia, el polvo y el barro no son un problema. Excepto el tamaño mini.



## Manillar

Ajustable en altura, tilt, dirección anterior y posterior y reversible.







## **Extremadamente modular, satisface las necesidades individuales de cada usuario**

por su diseño y componentes ajustables que brindan un soporte postural adecuado.

# Componentes



## **840 Pedales con puntera y traps**

Para mantener el antepié en su sitio sobre el pedal.



## **883 Barra regulable en altura para soporte torácico/pélvico (barra única).**


\*Advertencia: Facilita el equilibrio, pero no debe utilizarse para apoyar a un usuario que no tenga control del tronco.

Los componentes posturales deben ser elegidos y ajustados por un profesional de la salud que evalúe las capacidades residuales de cada usuario. Se requiere siempre la supervisión de un adulto, familiar o persona calificada, durante el uso del Triciclo.

# tamaños y pesos

|                                              | mini             | Small                | Medium               | Large                |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A: Ancho del manillar                        | 45 cm            | 50 cm                | 55 cm                | 60 cm                |
| B: Ancho entre ruedas                        | 62 cm            | 69 cm                | 75 cm                | 75 cm                |
| C1: Altura del pedal al asiento              | 39-53 cm         | 47-63 cm             | 59-72* cm            | 69-83* cm            |
| D: Distancia del suelo a la plataforma       | 12 cm            | 16 cm                | 16 cm                | 16 cm                |
| E: Longitud del manillar                     | 103 cm           | 119 cm               | 136 cm               | 162 cm               |
| F: Distancia del asiento al eje de dirección | 36 cm            | 41 cm                | 45 cm                | 56,5 cm              |
| G: Ancho del triciclo plegado                | /                | 74 cm                | 81 cm                | 95 cm                |
| I: I: Altura del triciclo plegado            | /                | 80 cm                | 90 cm                | 100 cm               |
| H: Altura del usuario                        | 90-110 cm        | 100-125 cm           | 120-145 cm           | 140-165 cm           |
| Peso total                                   | 15,5 kg          | 20 kg                | 23 kg                | 25,5 kg              |
| Carga máxima                                 | 30 kg            | 45 kg                | 60 kg                | 90 kg                |
| Canasto de almacenamiento                    | 41 x 18 x 6,6 cm | 44,9 x 23, 6x 6,6 cm | 49,7 x 27,4 x 9,6 cm | 49,7 x 27,4 x 9,6 cm |

\* con asiento estándar

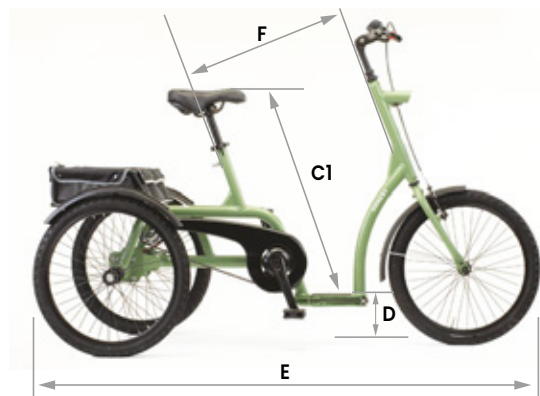


$$C1 = C2 - 2 \text{ cm}$$




Canasto de almacenamiento  
Vista desde arriba  
Medidas internas



mini - 15 kg  
S-M - 25 kg  
L-XL - 35 kg

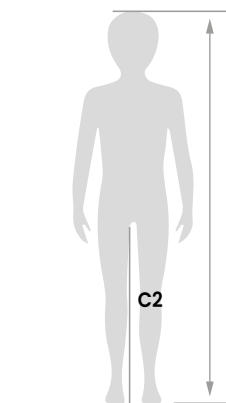

C2= longitud de la pierna

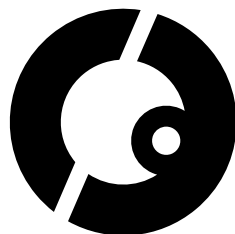

**CE** complies with MDR (EU) 2017/745  
SISTEMA DE CALIDAD  
ISO 13485

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**

**Reh**vita****

 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080  (+54911) 2328-6958  
 [ventas@rehavita.com.ar](mailto:ventas@rehavita.com.ar)  [www.rehavita.com.ar](http://www.rehavita.com.ar)