



Freedom[®] NXT[™]

Generación NEXT: Plegable y con Tilt en el espacio

Freedom: para chicos
(y otras personas también)



Muy liviana

Fuerte & durable

Fácil de usar



TM

Más allá del tilt...

NXT es híbrida "por diseño" es fuerte y durable a la vez que es ligera, compacta y fácil de usar.



A medida que crecen los niños, todo está en los números ...

Tres sujetadores ajustan el ancho del asiento de 5 cm en la mayoría de los tamaños.

Dos sujetadores ajustan la profundidad de asiento 10 cm en cada tamaño.

Dos sujetadores ajustan el ángulo del respaldo de 80° a 120°.



Para niños en movimiento, ponemos lo mejor de nosotros

Tilt activado por el pie, con pedal rebatible.


Bloqueo de ruedas activado con el pie.

Barra asistente para ascenso de cordón de vereda, antivuelco.



Transforma, transfiere y transporta...

Con NXT, los viajes nunca han sido tan fáciles.

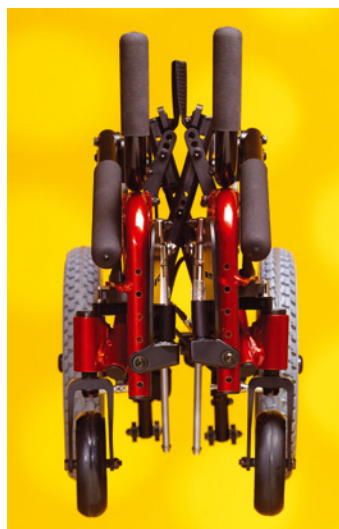

Transferencias tan fáciles como A, B, C...

A: Viaja liviano, sólo pesa 10 kilos.

B: Se pliega pequeña.

C: Cabe en espacios reducidos.



Transporta de forma segura...

NXT y Freedom Seating están preparados para el transporte público.

Las correas para el tránsito en transporte público se encuentran en la parte más resistente del marco.

Son muy visibles y de fácil acceso.



Innovaciones para mantener la seguridad

NXT es la primera silla de ruedas con Tilt que incorpora un asistente:

- Sistema de frenos de tambor para ayudar a controlar la velocidad, la dirección y bloqueo de ruedas.
- Control manual que frena y bloquea las ruedas e inclina el cuadro.
- Sistema antivuelco con asistente para subir el cordón incorporado.
- Además, NXT incorpora guías de nivelación del marco del asiento, indicando que el marco está recto y firme cuando no está inclinado.



NUEVA tapicería Air Mesh

Permite que el aire se mueva libremente entre la superficie del asiento y el cuerpo. La malla de aire está diseñada para ayudar a proteger la piel sensible, enfriando el cuerpo para reducir el calor y la humedad. También disponible con interfaz para incontinencia.



NUEVOS accesorios de posicionamiento

Soportes anteriores de tronco, cincha de tórax y cinturón pélvico están disponibles en el estilo que prefiera.



NXT es versátil y para siempre! transformándose rápidamente para niños en constante cambio



NUEVO ajuste de NXT

Cuando el crecimiento se dispara y el marco ya no es el adecuado, ajuste futuro de NXT de Freedom proporciona las piezas para hacer el marco más amplio. NXT de Freedom garantiza un buen ajuste para mañana y siempre!

Especificaciones

Ancho de asiento

El **NXT** está disponible en 11 tamaños desde 25.4 a 50.8 cm de ancho. Cada tamaño desde 25.4 cm hasta 40.6 cm de ancho y se ajusta 5 cm adicionales de ancho. El tamaño de 43 cm de ancho, se ajusta un adicional 2.5 cm a 45.7 cm de ancho. Los tamaños de 45.7 cm, 48.2 cm y 50.8 cm de ancho.

Profundidad de asiento

NXT está disponible en 3 tamaños: corto-mediano-largo. **NUEVO NXT Mini:** Para rango x-corto de 20.3 a 30.5 cm. Cada tamaño se ajusta 10 cm adicionales en profundidad. La profundidad del marco del asiento se mide desde el frente del poste trasero hasta el borde del asiento. El rango corto es de 30.5 a 40.6 cm. El rango mediano es de 35.5 a 45.7 cm. El largo alcance es de 40.6 a 50.8 cm.

Extensiones de profundidad

Para profundidades adicionales del marco del asiento, se pueden agregar extensiones en la parte posterior. Hay extensiones 5 cm, de 7.6 cm, o de 10 cm para elegir.

Capacidad de peso

102 kg.

Altura del asiento al suelo

NXT puede configurarse en una variedad de alturas al piso. La selección de los casters y de las ruedas traseras determinan un rango de opciones desde 31.7 cm, hasta 45.7 cm de alto.

Rango de Tilt

45 grados.



Our kids are our passion.™

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080 | (+54911) 2328-6958
ventas@rehavita.com.ar | www.rehavita.com.ar

Reh**h**avita®