

Dispositivo de asistencia de propulsión

SmartDrive MX2+



permobil

Asistencia de propulsión a demanda

Empujar una silla de ruedas manual puede causar estrés en sus hombros y conducir a serios problemas futuros. La asistencia de propulsión continua de SmartDrive ha demostrado que reduce hasta un 81%* de remadas y minimiza el estrés repetitivo, lo que le permite concentrarse en las cosas que importan.

*basado en datos recopilados de la aplicación SmartE Evaluation de SmartDrive



Su manija permite adjuntarlo rápidamente a casi cualquier silla de ruedas manual



Fácilmente extraíble, ideal para transportar

Varias opciones de control para potenciar el empuje, a tu manera


El diseño patentado de OmniWheel se mantiene asegurado en cualquier posición. Mantiene una óptima tracción y trapa inclinaciones de hasta 17%

Solo 6 kg: el dispositivo de asistencia de propulsión posterior más ligero en el mundo



Control de velocidad

Comience a andar, pare y cambie su velocidad sobre la marcha

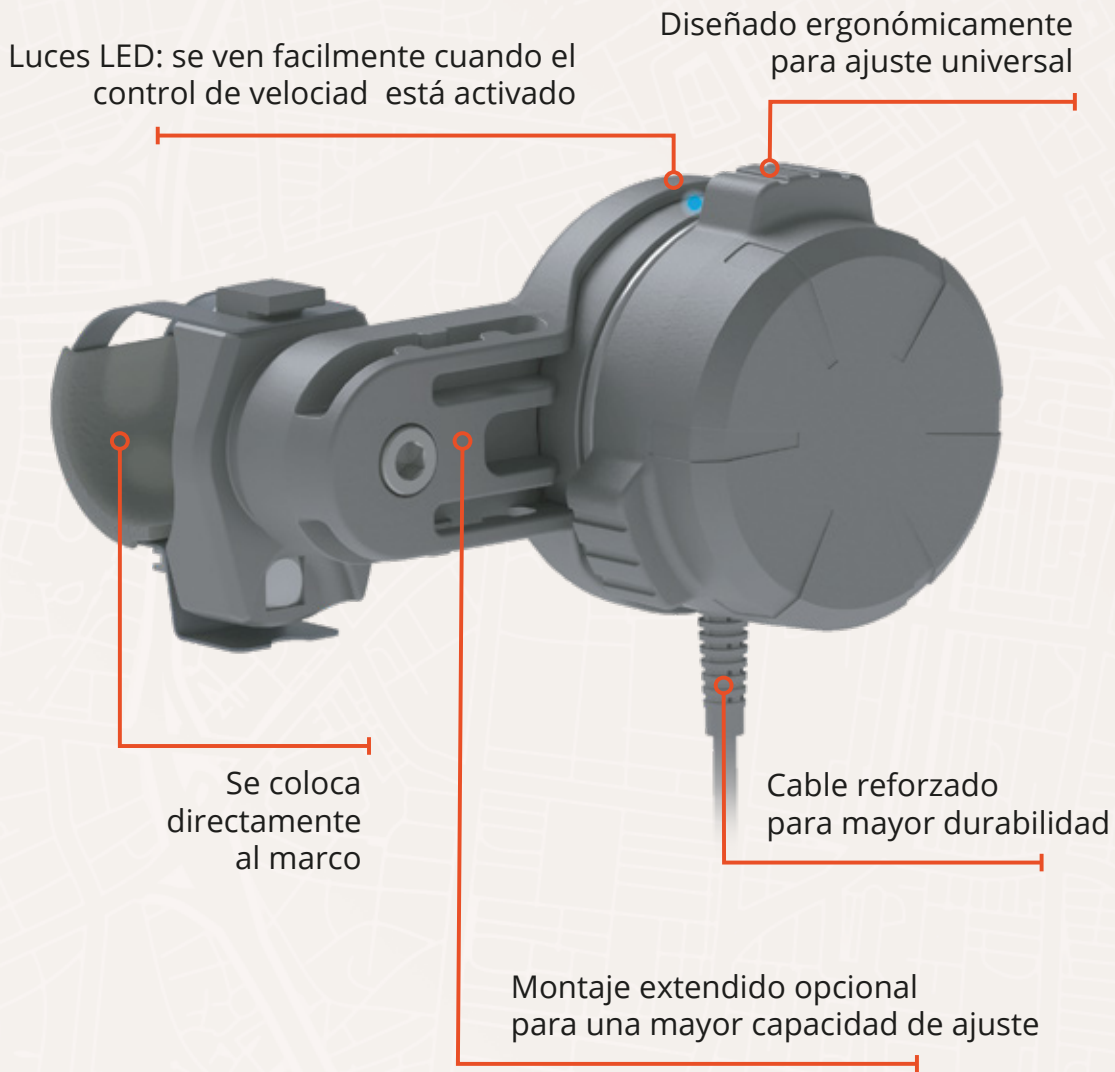

Activa la marcha en minutos
con el control de velocidad,
gracias a su sencilla instalación
y ajustes preconfigurados.





Apple Watch

Ahora puedes usar Apple Watch (serie 5 o posterior) para controlar SmartDrive MX2+

- Configuración rápida y sencilla
- Mayor visibilidad de la pantalla
- Rendimiento mejorado de la batería
- Aplicación gratuita en App Store

Apple Watch y App Store son marcas comerciales de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países.



Escanea aquí para descargar la Aplicación SmartDrive MX2+





PushTracker E3

El PushTracker E2 se actualizó al PushTracker E3, que incorpora un procesador actualizado y un mejor rendimiento de la batería.

- Aplicaciones precargadas para una fácil configuración en minutos
- Más pequeño, más liviano y más cómodo.
- Mejor duración de la batería
- Más receptivo y eficiente



SwitchControl

SwitchControl es una forma sencilla de controlar su SmartDrive con solo presionar un botón. Puede usar SwitchControl en modo momentáneo o bloqueado y, opcionalmente, conectar un interruptor externo con con un conector mono jack personalizado.

Momentáneo

Su SmartDrive se activará mientras mantenga presionado cualquiera de los interruptores.

Contínuo

Mantenga presionado cualquiera de los interruptores para establecer su velocidad de cruceo. Cuando desee detenerse, simplemente toque el interruptor y sostenga las ruedas.

SwitchControl con opción de conector mono jack

Use cualquier interruptor mono jack externo para operar su SwitchControl, sin necesidad de programación.



Montaje en el cuadro del SwitchControl



Botón con extensión del montaje

Apple Watch

El mejor rendimiento de la batería en su clase y una excelente experiencia de uso.

Push Tracker E3

Fácil de leer los controles de configuración en la pantalla táctil.

SwitchControl

Botón con cable con opción de controles adicionales para tu SmartDrive

Smart Drive MX2+

Potencia las subidas de inclinaciones y rampa sobre alfombras mullidas y distancias largas

Control de velocidad

Fácil de encender, parar y cambiar la velocidad sobre la marcha.

Potencia tu remada, tu camino

SmartDrive proporciona a los usuarios de sillas de ruedas manuales más control que nunca sobre su experiencia. Descubra cómo nuestra variedad de soluciones de hardware y software se pueden combinar para alcanzar mejor sus objetivos de movilidad personalizados.

Las nuevas y mejoradas opciones de control de SmartDrive hacen que se más fácil que nunca conseguir menos remadas.

	SpeedControl	SwitchControl	PushTracker E3	SmartDrive MX2+ App para Apple Watch
				
Gratis con la compra de SmartDrive	✓	✓	Con recargo	App gratuita
Proporcionado por Permobil	✓	✓	✓	Apple Watch No proporcionado
Plug and play	✓	✓		
Se configura en menos de 5 min.	✓	✓	✓	✓
Configuraciones programables	✓	✓	✓	✓
No requiere carga	✓	✓		
Opción de puerto mono jack		✓		
Funciona con SwitchControl		✓	✓	✓
Funciona con SpeedControl	✓		✓	✓
Opción de control por cable	✓	✓		
No requiere Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Puede aumentar o disminuir la velocidad sin parar	✓			



Especificaciones SmartDrive

Dimensiones	Longitud: 38.9 cm Ancho: 14.5 cm Altura: 24.2 cm
Peso del producto	6 kg
Peso del usuario	14 a 150 kg
Rendimiento*	19.8 km
Motor	250 W Brushless DC
Velocidad máxima	8.8 km/h
Temperatura de func.	-25°C a 50°C
Compatibilidad de sillas	Rígido, plegable, inclinable en el espacio, accionamiento con un brazo Anchos de silla: 8" (sin antivuelcos) -22"
Diámetro de ruedas	22", 24", 25", 26" (501, 540, 559, 590 mm)
Garantía	2 años
Bluetooth LE	FCC ID QOQBT113 IC ID 5123A-BGTBLE113

* Las medidas de rendimiento varían según las características del usuario y de la silla, la conducción y las condiciones de la batería.

SmartDrive ha sido probado y cumple con todos los requisitos aplicables de las Normas ANSI/RESNA para sillas de ruedas - Volumen 1 y Volumen 2 y EN 12184.

NOTA: Las especificaciones de una silla de ruedas proporcionadas por su fabricante pueden verse ligeramente afectadas por la adición de SmartDrive. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones más detalladas sobre el funcionamiento y el cuidado.