

# Almohadón ROHO® QUADTRO SELECT®

## Guía de inflado y ajuste

QUADTRO SELECT tiene cuatro compartimentos de celdas de aire. Cuando el control de memoria ISOFLO® está abierto, el aire fluye libremente entre los compartimientos. Cuando el ISOFLO está cerrado, el aire se "bloquea" dentro de cada compartimiento. El nivel de inflado de cada compartimiento se puede ajustar por separado. Esto le permite corregir o adaptarse a las asimetrías de lado a lado y/o anteroposterior de la pelvis y la parte superior de las piernas. NOTA: Antes de ajustar el almohadón para una asimetría, DEBE ajustar el nivel de inflado del aire al ajuste adecuado de inflado del almohadón como se describe a continuación.

**Inflar y ajustar** el almohadón ROHO QUADTRO SELECT para un nuevo usuario.

**Verificar** el nivel de inflado diariamente realizando una verificación manual.

**Vuelva a ajustar** el nivel de inflado solo cuando sea necesario (normalmente cada 3 o 4 meses).


### Configuración QUADTRO SELECT Ajuste QUADTRO SELECT

1. Coloque el almohadón QUADTRO SELECT en la silla de ruedas, con las celdas de aire hacia arriba y la superficie antideslizante de la cubierta hacia abajo.

2. Antes de inflar, debe abrir el control de memoria ISOFLO para que todas las celdas de aire se inflen. Empuje la perilla verde ISOFLO hacia la posición de desbloqueo.




3. Deslice la boquilla de goma de la bomba manual sobre la válvula de inflado. Apriete la boquilla, gírela para abrir la válvula de inflado e infle en exceso las celdas de aire.

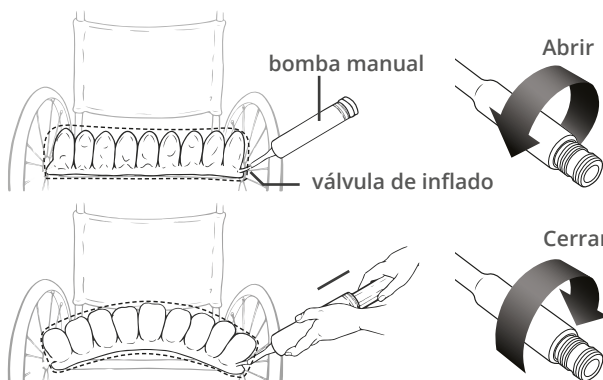

4. Retire la bomba manual.


Después de inflar en exceso el almohadón, realice una verificación manual para **ajustar la configuración adecuada de inflado del almohadón**:

1. El usuario debe sentarse en la silla en su posición habitual. El almohadón debe estar centrado debajo del usuario.

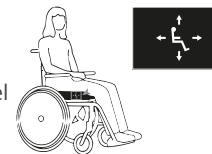


2. Realice una verificación manual:


a) Deslice su mano entre el almohadón y el usuario. Levante la pierna ligeramente y busque la prominencia ósea más baja y luego baje la pierna hasta una posición sentada. Después de inflar en exceso el almohadón, realice una verificación manual para ajustar la configuración adecuada de inflado del almohadón:

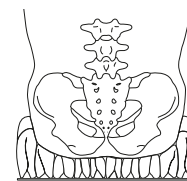

b) Abra la válvula para eliminar el aire, manteniendo la mano debajo de la prominencia ósea más baja del usuario.

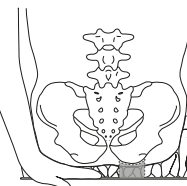

c) Suelte aire hasta que puede mover ligeramente las yemas de los dedos. Cierre la válvula.

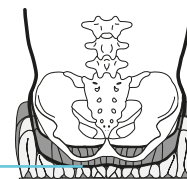

1,5-2,5 cm (½"-1")

Ajuste adecuado de inflado del almohadón ½" - 1" (1,5 - 2,5 cm)

### Resultados de la verificación manual

— Si puede mover ligeramente las yemas de los dedos: el almohadón se encuentra en la configuración adecuada de inflado del almohadón (entre 1,5 y 2,5 cm de aire entre la prominencia ósea más baja y la superficie del asiento) y no es necesario realizar más ajustes.

— Si puede mover fácilmente las yemas de los dedos: hay demasiado aire entre la prominencia de la parte ósea más baja y la superficie del asiento. Abra la válvula de inflado y libere aire lentamente hasta que apenas pueda mover las yemas de los dedos, luego cierre la válvula.

— Si no puede mover las yemas de los dedos en absoluto: hay muy poco o nada de aire entre la prominencia ósea más baja y la superficie del asiento. Abra la válvula de inflado y agregue aire lentamente hasta que pueda mover ligeramente las yemas de los dedos, luego cierre la válvula.

Consulte el reverso para obtener instrucciones sobre cómo ajustar QUADTRO SELECT para asimetrías posturales.