

Almohadón ROHO® DRY FLOATATION®

Guía de inflado y ajuste

permobil


Inflar y ajustar el almohadón ROHO® para un nuevo usuario.

Verificar el nivel de inflado diariamente realizando una verificación manual.

Vuelva a ajustar el nivel de inflado solo cuando sea necesario (normalmente cada 3 o 4 meses).

Configuración del almohadón ROHO®

1. Coloque el almohadón ROHO en la silla de ruedas con las celdas de aire hacia arriba y la superficie antideslizante de la cubierta hacia abajo.
2. Deslice la boquilla de goma de la bomba manual sobre la válvula de inflado. Apriete la boquilla, gírela para abrir la válvula de inflado e infle las celdas de aire.
3. Cuando todas las celdas de aire estén demasiado infladas y el almohadón comience a arquearse ligeramente, apriete la boquilla de goma de la bomba manual y gírela para cerrar completamente la válvula de inflado.
4. Retire la bomba manual.

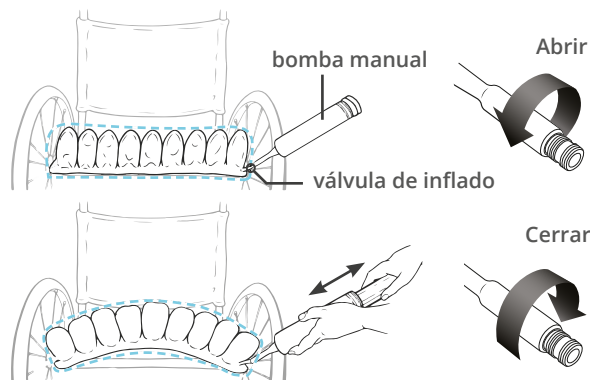

Resultados de la verificación manual

— Si puede mover ligeramente las yemas de los dedos: el almohadón se encuentra en la configuración adecuada de inflado del almohadón (entre 1,5 y 2,5 cm o 1/2"-1" de aire entre la prominencia ósea más baja y la superficie del asiento) y no es necesario realizar más ajustes.


— Si puede mover fácilmente las yemas de los dedos: hay demasiado aire entre la prominencia de la parte ósea más baja y la superficie del asiento. Abra la válvula de inflado y libere aire lentamente hasta que apenas pueda mover las yemas de los dedos, luego cierre la válvula.

— Si no puede mover las yemas de los dedos en absoluto: hay muy poco o nada de aire entre la prominencia ósea más baja y la superficie del asiento. Abra la válvula de inflado y agregue aire lentamente hasta que pueda mover ligeramente las yemas de los dedos, luego cierre la válvula.


Ajuste del almohadón ROHO®

Después de inflar en exceso el almohadón ROHO, realice una verificación manual para ajustar la configuración de inflado del almohadón adecuada:

1. El usuario debe sentarse en su posición habitual en la silla. El almohadón debe estar centrado debajo del usuario.
2. Realice una verificación manual:
 - a) Deslice su mano entre el almohadón y el usuario. Levante la pierna ligeramente y busque la prominencia ósea más baja y luego baje la pierna hasta una posición sentada.
 - b) Abra la válvula para eliminar el aire, manteniendo la mano debajo de la prominencia ósea más baja del usuario
 - c) Suelte el aire hasta que pueda mover ligeramente las yemas de los dedos. Cierre la válvula.

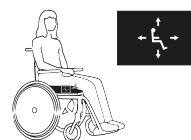

Orientación del almohadón

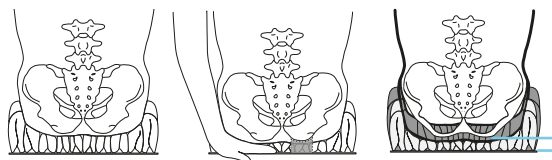

1/2"-1" Ajuste adecuado de inflado del almohadón
1/2" - 1" (1,5 - 2,5 cm)



Consulte el manual para obtener más información de seguridad sobre los almohadones ROHO®.