

Dispositivo de asistencia de propulsión

# SmartDrive MX2+



**permobil**



# Asistencia de propulsión a demanda

Empujar una silla de ruedas manual puede causar estrés en sus hombros y conducir a serios problemas futuros. La asistencia de propulsión continua de SmartDrive ha demostrado que reduce hasta un 81%\* de remadas y minimiza el estrés repetitivo, lo que le permite concentrarse en las cosas que importan.

\*basado en datos recopilados de la aplicación SmartE Evaluation de SmartDrive



Su manija permite adjuntarlo rápidamente a casi cualquier silla de ruedas manual



Fácilmente extraíble, ideal para transportar



El diseño patentado de OmniWheel se mantiene asegurado en cualquier posición. Mantiene una óptima tracción y trapa inclinaciones de hasta 17%

Solo 6 kg: el dispositivo de asistencia de propulsión posterior más ligero en el mundo




Varias opciones de control para potenciar el empuje, a tu manera

permobil

# Control de velocidad

Comience a andar, pare y cambie su velocidad sobre la marcha

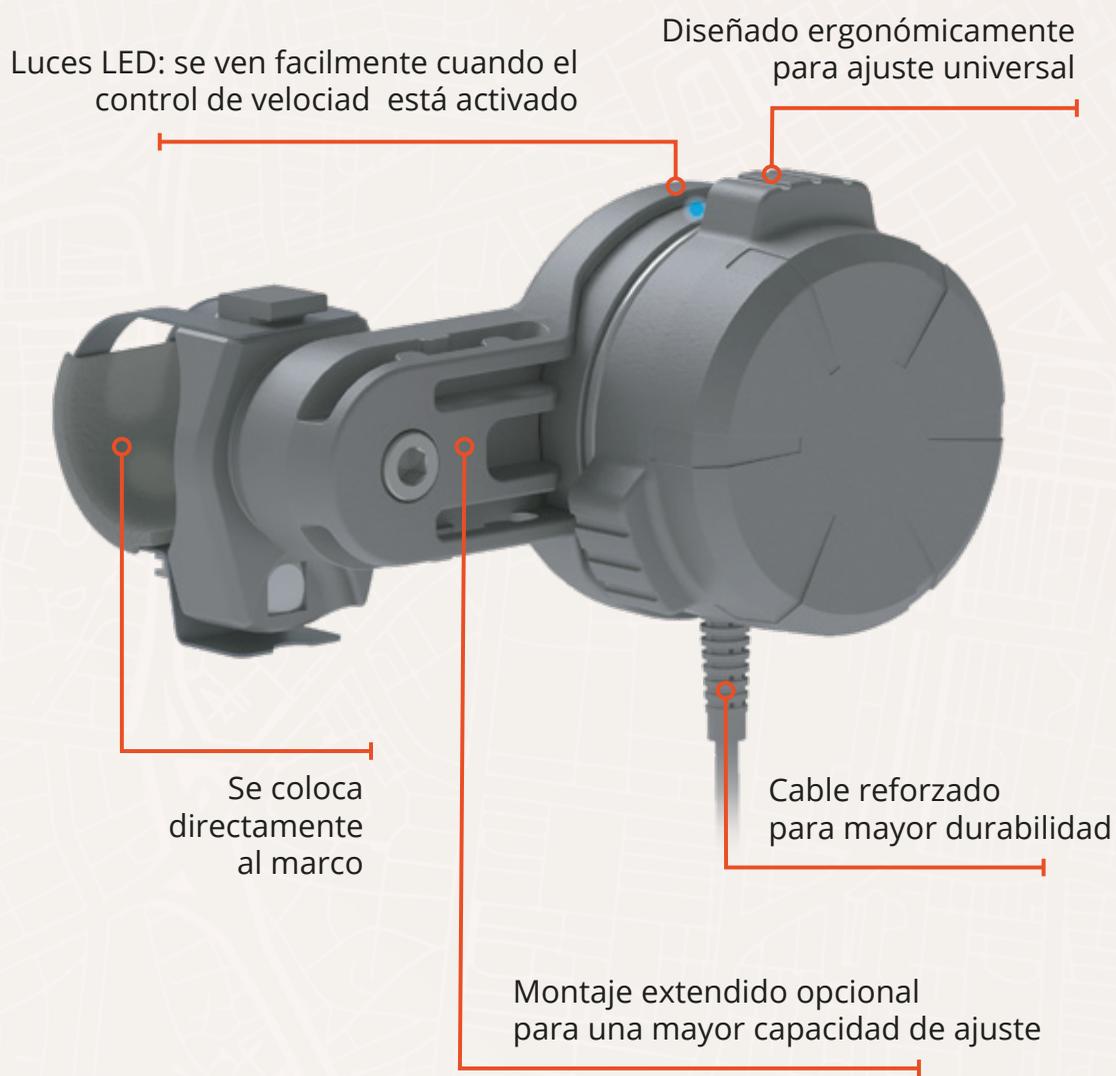

Activa la marcha en minutos  
con el control de velocidad,  
gracias a su sencilla instalación  
y ajustes preconfigurados.





# Mandos portátiles premium

¡Complementa tu mando con cable con un dispositivo portátil premium!

Ahora puedes usar tu Apple Watch (Serie 5 o posterior) o tu Samsung Galaxy Watch (Serie 4 o posterior) para controlar tu SmartDrive.

- Configuración rápida y sencilla
- Mayor visibilidad de la pantalla
- Mejor rendimiento de la batería
- App gratuita disponible en la App Store o Google Play Store





# SwitchControl

SwitchControl es una forma sencilla de controlar su SmartDrive con solo presionar un botón. Puede usar SwitchControl en modo momentáneo o bloqueado y, opcionalmente, conectar un interruptor externo con con un conector mono jack personalizado.

## Momentáneo

Su SmartDrive se activará mientras mantenga presionado cualquiera de los interruptores.

## Contínuo

Mantenga presionado cualquiera de los interruptores para establecer su velocidad de cruceo. Cuando desee detenerse, simplemente toque el interruptor y sostenga las ruedas.

## SwitchControl con opción de conector mono jack

Use cualquier interruptor mono jack externo para operar su SwitchControl, sin necesidad de programación.



Montaje en el cuadro del SwitchControl



Botón con extensión  
del montaje



**Apple Watch**  
Dispositivo portátil premium

**Samsung Galaxy Watch**  
Dispositivo portátil premium

**SwitchControl**  
Botón con cable con opción de controles adicionales para tu SmartDrive


**Smart Drive MX2+**  
Potencia las subidas de inclinaciones y rampas sobre alfombras mullidas y distancias largas

**Control de velocidad**  
Fácil de encender, parar y cambiar la velocidad sobre la marcha.

## Potencia tu remada, tu camino

SmartDrive proporciona a los usuarios de sillas de ruedas manuales más control que nunca sobre su experiencia. Descubra cómo nuestra variedad de soluciones de hardware y software se pueden combinar para alcanzar mejor sus objetivos de movilidad personalizados.

# Las nuevas y mejoradas opciones de control de SmartDrive hacen que sea más fácil trasladarse con menos remadas.

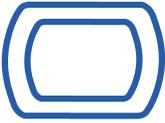	SpeedControl Dial	SwitchControl	App SmartDrive MX2+ para dispositivos portátiles
			
Gratis con la compra de SmartDrive	✓	✓	App gratuita
Proporcionado por Permobil	✓	✓	Dispositivo portátil no provisto
Plug-and-play	✓	✓	
Se configura en menos de 5 min.	✓	✓	✓
Configuraciones programables	✓	✓	✓
No requiere carga	✓	✓	
Opción de puerto mono jack		✓	
Funciona con SwitchControl		✓	✓
Funciona con SpeedControl	✓		✓
Opción de control por cable	✓	✓	
No requiere Wi-Fi	✓	✓	✓
Puede aumentar o disminuir la velocidad sin parar	✓		



## Especificaciones SmartDrive

Dimensiones	Longitud: 38.9 cm Ancho: 14.5 cm Altura: 24.2 cm
Peso del producto	6 kg
Peso del usuario	14 a 150 kg
Rendimiento*	19.8 km
Motor	250 W Brushless DC
Velocidad máxima	8.8 km/h
Temperatura de func.	-25°C a 50°C
Compatibilidad de sillas	Rígido, plegable, inclinable en el espacio, accionamiento con un brazo Anchos de silla: 8" (sin antivuelcos) -22"
Diámetro de ruedas	22", 24", 25", 26" (501, 540, 559, 590 mm)
Garantía	2 años
Bluetooth LE	FCC ID QOQBT113 IC ID 5123A-BGTBLE113

\* Las medidas de rendimiento varían según las características del usuario y de la silla, la conducción y las condiciones de la batería.

SmartDrive ha sido probado y cumple con todos los requisitos aplicables de las Normas ANSI/RESNA para sillas de ruedas - Volumen 1 y Volumen 2 y EN 12184.

NOTA: Las especificaciones de una silla de ruedas proporcionadas por su fabricante pueden verse ligeramente afectadas por la adición de SmartDrive. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones más detalladas sobre el funcionamiento y el cuidado.